

ORIMED®


ORI-BZ-J107 - KARPULA STOMATOLOGICZNA Z ASPIRACJĄ - Typ "Trzy koła"

Instrukcja użytkowania

Budowa karpuli

Karpula składa się z:

- tulei ⑤ na ampułkę ze środkiem znieczulającym oraz gwintowanej dyszy ① do mocowania igły,
- uchwytu dozującego ⑦ z tłoczkiem dozującym ③ zakończonym ząbkami ②,
- uchwytów na palce ⑥ oraz tłoczka blokującego ④

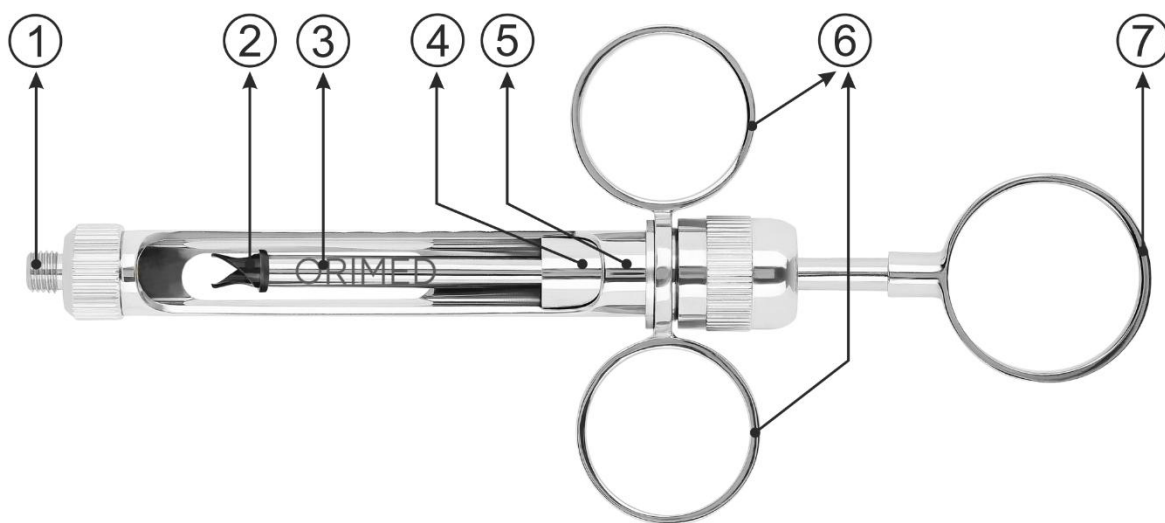

Przygotowanie

Za pomocą uchwytu ⑦ odciągnąć tłoczek dozujący ③ do momentu cofnięcia się tłoczka blokującego ④.

Umieścić ampułkę ze środkiem znieczulającym w tulei ⑤.

Zwolnić tłoczek dozujący ③, co spowoduje zablokowanie ampułki przez tłoczek blokujący ④.

Dociskając i obracając tłoczek dozujący ③ wkręcić ząbki ② w gumowy tłok ampułki.

Ważne: Prawidłowe zakotwiczenie jest niezbędne do wykonania testu aspiracji (sprawdzenia, czy igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym)

Zdjąć zabezpieczenie z tylnej części igły (krótszy koniec).

Włożyć ją do dyszy ① przebijając membranę ampułki i nakręcić.

Ważne: Dłuższą osłonkę igły zdjąć tuż przed iniekcją.

Karpula jest gotowa do użycia.

UWAGA:

Należy bezwzględnie przestrzegać procedury montażu ampułki, jej poprawnego blokowania w tulei oraz nakręcania igły, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

ORIMED®

Nakręcanie igły przed zablokowaniem ampułki powoduje uszkodzenie igły oraz wyciek środka znieczulającego do wnętrza strzykawki. Wyciek środka znieczulającego powoduje uszkodzenie powłoki narzędzia.

Obsługa

Przed wkłuciem wykonać test drożności. W tym celu należy za pomocą uchwytu ⑦ nacisnąć lekko tłoczek dozujący ③, aby wypuścić kroplę płynu (upewniając się, że igła jest drożna i zostały usunięte pęcherzyki powietrza).

Po wkłuciu odciągnąć lekko tłoczek dozujący ③. Jeśli w ampułce pojawi się krew, należy zmienić położenie igły.

Środek znieczulający należy podawać powoli, aby zminimalizować dyskomfort pacjenta i ryzyko uszkodzenia tkanek.

Czyszczenie i sterylizacja

Ze względu na złożoną budowę (wiele punktów stycznych) należy zadbać o bardzo staranne wysuszenie części strzykawki przed jej pakietowaniem i sterylizacją w autoklawie. Należy się stosować do załączonej instrukcji sterylizacji.

GWARANCJA

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją.