

ORI-JECT ORI-BZ-720-003 - strzykawka do znieczulenia śródwięzadłowego

Instrukcja użytkowania

Budowa strzykawki

Strzykawka składa się z:

- tulei wyposażonej we wzornik, która służy do założenia naboju ze środkiem znieczulającym oraz gwintowanej dyszy, na którą nakłada się igłę,
- uchwytu z dźwignią dozującą, tłoczka dozującego oraz przycisku zwalniającego tłoczek.

Części te są połączone złączem bagnetowym.

Przygotowanie

Przekręcając złącze bagnetowe należy rozmontować strzykawkę. Aby przesunąć tłok do pozycji wyjściowej, należy nacisnąć przycisk zwalniający i przytrzymać strzykawkę w pozycji pionowej (złączem bagnetowym do góry).

Umieścić nabój ze środkiem znieczulającym w tulei i ponownie połączyć obie części strzykawki za pomocą złącza bagnetowego. Naciskać dźwignię dozującą, aż wyczuwalny będzie delikatny opór. W tej pozycji dźwignia dozująca dochodzi do zamknięcia naboju ze środkiem znieczulającym i ustala nabój w tulei.

Włożyć igłę jednorazowego użytku do dyszy i nakręcić.

Naciskać dźwignię dozującą do momentu, gdy roztwór środka znieczulającego dotrze do ostrza igły. Strzykawka jest gotowa do użycia.

UWAGA:

Należy bezwzględnie przestrzegać procedury montażu ampułki, jej poprawnego blokowania w tulei oraz nakręcania igły, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Nakręcanie igły przed zablokowaniem ampułki powoduje uszkodzenie igły oraz wyciek środka znieczulającego do wnętrza strzykawki. Wyciek środka znieczulającego powoduje uszkodzenie powłoki narzędzia.

Obsługa strzykawki ORI-JECT ORI-BZ-720-003

Każde naciśnięcie dźwigni dozującej powoduje podanie 0,05 ml środka znieczulającego. Zwykle dla **każdego korzenia** wymagane jest od 0,15 ml do 0,20 ml środka znieczulającego. Jedno naciśnięcie dźwigni dozującej powinno trwać ok. 7 sekund.

Czyszczenie i sterylizacja

Ze względu na złożoną budowę (wiele punktów styecznych) należy zadbać o bardzo staranne wysuszenie części strzykawki przed jej pakietowaniem i sterylizacją w autoklawie. Należy się stosować do załączonej instrukcji sterylizacji.

GWARANCJA

Strzykawka objęta jest 24 miesięczną gwarancją.