

ORI-JECT ORI-BZ-720-005 - strzykawka do znieczulenia śródwięzadłowego

Instrukcja użytkowania

Budowa strzykawki

Strzykawka składa się z:

- tulei, która służy do założenia naboju ze środkiem znieczulającym oraz gwintowanej dyszy, na którą nakłada się igłę,
- uchwyty z dźwignią dozującą, tłoczka dozującego.

Przygotowanie

Przekręcając tuleję należy rozmontować strzykawkę. Aby umieścić tłok w pozycji wyjściowej, należy wyciągnąć go w kierunku przedniej części strzykawki i ponownie umieścić tłok w otworze w tylnej części.

Umieścić nabój ze środkiem znieczulającym w tulei i ponownie połączyć obie części strzykawki. Naciskać dźwignię dozującą, aż wyczuwalny będzie delikatny opór. W tej pozycji dźwignia dozująca dochodzi do zamknięcia naboju ze środkiem znieczulającym i ustala nabój w tulei.

Włożyć igłę jednorazowego użytku do dyszy i nakręcić.

Naciskać dźwignię dozującą do momentu, gdy roztwór środka znieczulającego dotrze do ostrza igły. Strzykawka jest gotowa do użycia.

UWAGA:

Należy bezwzględnie przestrzegać procedury montażu ampułki, jej poprawnego blokowania w tulei oraz nakręcania igły, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Nakręcanie igły przed zablokowaniem ampułki powoduje uszkodzenie igły oraz wyciek środka znieczulającego do wnętrza strzykawki. Wyciek środka znieczulającego powoduje uszkodzenie powłoki narzędzia.

Obsługa strzykawki ORI-JECT ORI-BZ-720-005

Każde naciśnięcie dźwigni dozującej powoduje podanie 0,06 ml środka znieczulającego. Zwykle dla **każdego korzenia** wymagane jest od 0,15 ml do 0,20 ml środka znieczulającego. Jedno naciśnięcie dźwigni dozującej powinno trwać ok. 7 sekund.

Czyszczenie i sterylizacja

Ze względu na złożoną budowę (wiele punktów stycznych) należy zadbać o bardzo staranne wysuszenie części strzykawki przed jej pakietowaniem i sterylizacją w autoklawie. Należy się stosować do załączonej instrukcji sterylizacji.

GWARANCJA

Strzykawka objęta jest 24 miesięczną gwarancją.